

# Aktivní antidekubitní matrace Rossmax AM30

## Návod k obsluze



### Úvod

Děkujeme vám za zakoupení bublinové nafukovací antidekubitní matrace Rossmax. Při správném používání a péči o produkt vám nafukovací matrace poskytne mnoho let spolehlivé služby. Doporučujeme vám, abyste důkladně prostudovali tuto příručku, abyste se dozvěděli vše o používání a funkci vaší nafukovací matrace. Matrace zmírňuje tlak na tělo postupným napouštěním a vypouštěním vzduchových buněk přibližně v 6-ti minutových intervalech. Je určena na prevenci dekubitů a na dlouhodobou péči o pacienty, kteří trpí proleženinami. Pozor: Prostudujte průvodní doklady. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku. Prosím, uchovejte tento návod k pozdějšímu nahlédnutí.

### Bezpečnostní upozornění

1. Nekuřte v blízkosti čerpadla.
2. Udržujte čerpadlo mimo dosah horkých povrchů a sálavého tepla.
3. Nikdy nepoužívejte tento výrobek, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud nepracuje správně, obraťte se prosím na autorizované servisní středisko nebo na svého prodejce.
4. Při výměně pojistky použijte jen doporučený typ (T 1A /250V).
5. Nepoužívejte u pacientů, kteří mají poranění míchy.
6. Přísný dohled je vyžadován, pokud je tento výrobek používán v blízkosti dětí.
7. Používejte tento výrobek pouze pro jeho zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte jiné matrace, které nejsou doporučené výrobcem.
8. Neopravujte sami ani nijak neopravujte tento výrobek.
9. Máte-li podezření, že máte alergickou reakci, poraďte se s lékařem.


### Použití

1. Umístěte matraci na postel, hadicemi k nohám pacienta.
  2. Pomocí integrovaného závěsu zavěste čerpadlo na čelo lůžka na straně u nohou pacienta, nebo v nejbližším okolí na rovný povrch.
  3. Připojte vzduchové hadice z matrace do čerpací jednotky. Poznámka: Zkontrolujte a ujistěte se, že vzduchové hadice nejsou zalomené nebo zastrčené pod matrací.
  4. Připojte čerpadlo do zdi elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napájecí kabel je v bezpečné vzdálenosti od možných rizik. Poznámka: Po instalaci přívodní kabel zajistěte tak, aby se předešlo riziku vytržení kabelu ze zásuvky nebo jiným nehodám.
  5. Zapněte hlavní vypínač na ovládacím panelu čerpadla. Čerpadlo začne nafukovat matraci. Poznámka: Čerpadlo by měl být používáno pouze s matrací doporučenou výrobcem. Nepoužívejte ho k žádnému jinému účelu.
  6. Při nafukování upravte nastavení tlaku v matraci dle hmotnosti a potřeb pacienta. Otočením knoflíku nastavení tlaku ve směru hodinových ručiček se zvyšuje tlak v matraci.
- Poznámka: Pokaždé, když je matrace připravena k použití, doporučuje se, aby se tlak nejprve nastavil na maximum, a teprve po prvním natlakování byla nastavena potřebná pevnost matrace.

## Kontraindikace

Stav pacienta, pro které je použití kompresivní terapie s využitím systému s proměnlivým tlakem kontraindikováno:

- Léčba poranění páteře
- Při porušené míše

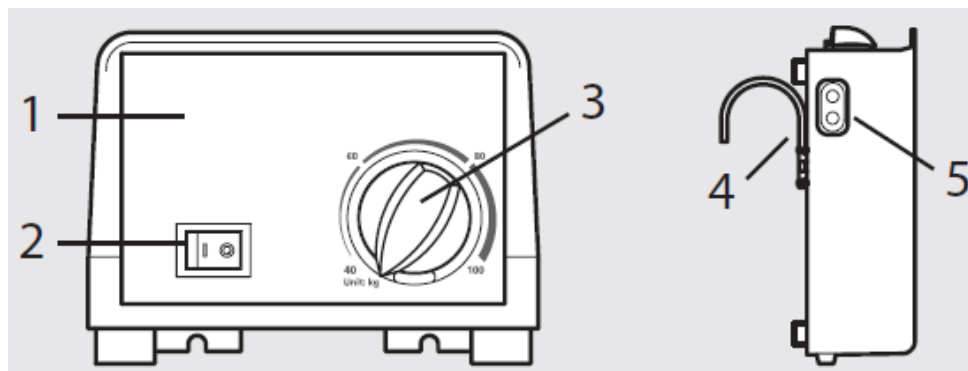

## Popis produktu

Kompresorová jednotka:

1. Ovládací panel
2. ON/OFF (hlavní vypínač)
3. Otočný ovladač tlaku
4. Závěsná konzola
5. výstup vzduchu

## Základní vlastnosti

- Výkon 2-6 litrů za minutu
- Přepouštění tlaku do dvou okruhů
- Doba cyklu - 6 minut
- Vestavěná montážní konzola pro zavěšení na postel
- Napájecí kabel 3 metry
- 24 měsíců záruka

Bublinová matrace:

- Rozměry: 200 × 90 cm, výška 7 cm.
- 130 bublinových komor po celém povrchu podložky

## Údržba a čištění

K čištění a dekontaminaci bublinové matrace postupujte podle následujících pokynů:

### Čerpadlo:

- NEPONOŘUJTE čerpadlo do vody ani jiných kapalin.
- Nestříkejte jakýkoli čistící prostředek přímo na povrch čerpadla.
- Nepoužívejte agresivní čistící roztoky nebo rozpouštědla.
- Je-li čerpadlo vyčištěné a suché, připojte čerpadlo k elektrické síti.

### Bublinová matrace:

- Důkladně očistěte matraci od znečištění krví nebo močí čistým, vlhkým hadříkem.
- Nechte důkladně vyschnout. Poté otřete matraci dezinfekčním prostředkem.
- Po vyčištění dosušte matraci mimo dosah přímého slunce

### Manipulace a skladování

- Rozložte matraci na rovném povrchu. Manipulujte s ní opatrně.
- Odpojte čerpadlo a uložte ho na suché místo.
- Po skončení životnosti a pro likvidaci dodržujte předpisy a požadavky na likvidaci.

## Řešení problémů

Závada	Řešení
Kompresorová jednotka nepracuje	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zkontrolujte, zda je správně zasunut konektor.</li><li>2. Zapněte tlačítko napájení.<ul style="list-style-type: none"><li>• Svítí-li indikátor napájení a čerpadlo stále nefunguje, měli byste okamžitě kontaktovat svého místního prodejce.</li><li>• Nesvítí-li indikátor napájení, může to znamenat, že je zásuvka poškozena. Prosím, zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky. Pokud indikátor napájení je stále</li></ul></li></ol>

	nesvítí, obraťte se na elektrikáře, aby zkontroloval elektrickou síť.
Nízký tlak v matraci	<ol style="list-style-type: none"> <li>Otočte knoflík nastavení tlaku na maximum.</li> <li>Zkontrolujte, zda nejsou vzduchové hadice k čerpadlu překroucené nebo odpojené nebo jestli není netěsnost v propojení. Zkontrolujte těsnost matrace. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hadice by měly vždy být uspořádány rovně, nemají být překrouceny nebo přeloženy.</li> <li>Vyměňte hadice, pokud netěsní.</li> </ul> </li> </ol>

#### Technická data:

	Popis
<b>Třída ZP</b>	Třída I
<b>Použité díly</b>	Bublinová matrace
<b>Napájení</b>	230 V / 50 Hz
<b>Požadavky na provoz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplota: <ul style="list-style-type: none"> <li>Provozní: 10 ~ 40 ° C</li> <li>Skladovací: -18 ~ 43 ° C</li> <li>Přepravní: -18 ~ 43 ° C</li> </ul> </li> <li>Vlhkost: <ul style="list-style-type: none"> <li>Provozní: 10 % ~ 75 % bez kondenzace</li> <li>Skladovací: 10 % ~ 95% bez kondenzace</li> </ul> </li> </ul>

#### Kompresorová jednotka:

	Popis
Rozměry	26,5 × 13,5 × 10 cm
Hmotnost	1,4 kg
Délka jednoho přepouštěcího cyklu	6 min

#### Bublinová matrace:

Hmotnost	Rozměry	Materiál	Maximální zatížení
2,3 kg	200 × 90 × 7 cm	PVC	100 kg

Distributor pro ČR a SR:

**cm-trade**

CM Trade Via, s.r.o.  
Jundrovská 618/31  
62400 Brno

Tel: +420 549 274 164

e-mail:  
info@cm-trade.cz